




## 製品仕様

医療機器認証番号	第229AKBZX00028000号
類別	機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般的名称	パルスオキシメータ
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名	パルスオキシメータOX-200
測定方式	2波長吸光度法
表示方法	LED
測定範囲	SpO <sub>2</sub> : 35%~99% 脈拍: 30bpm~250bpm
測定精度	SpO <sub>2</sub> : 70%~99%: ±2% (70%未満は規定なし) 脈拍: 30bpm~100bpm ±2bpm 100bpm~250bpm ±2%
使用環境温湿度	10°C~40°C 30~85%RH
保管環境温湿度	-10°C~60°C 10~85%RH
電源	単4形アルカリ乾電池（2個）DC3V
電池寿命	約3,000回(単4形アルカリ乾電池使用時)
連続使用時間	約32時間(単4形アルカリ乾電池使用時)
電撃保護	内部電源機器BF型
外形寸法	約 57×31×30mm
本体質量	約 23g (電池を含まない)
耐用年数	約 4年 (当社自己認証による)
付属品	動作確認用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので了承ください。

## 相関図

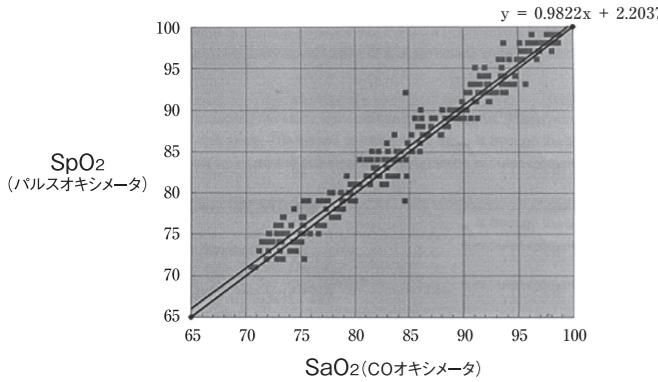

パルスオキシメータの精度は絶対基準ではありません。実験によるCOオキシメータでのSpO<sub>2</sub>との相関で表示されます。(ISO 80601-1-2-61による)

## 故障かな？と思ったら

### ●電源が入らない

原因	対処方法
電池が消耗している	新しい電池に交換してください。「電池交換」をご参照ください
電池の向きを間違えている	電池を正しくセットし直してください。「電池交換」をご参照ください
機器の故障	お買い上げいただいた販売店より修理をご依頼ください
電源ボタンを押していない	電源ボタンを押してから指を挿入してください

### ●SpO<sub>2</sub>および脈拍数が正常に表示されない

原因	対処方法
指が正しく挿入されていない	指を正しく挿入し再測定してください
指が十分深く入っていない	指を正しく挿入し再測定してください
指や身体が動いている	歩いたり指先を動かしたりせず安静にして再測定してください
指や機器が冷たい	マッサージなどで指先を温めてください 暖かい環境で少し機器を温めてください

### ●表示が突然消える

原因	対処方法
指を挿入しても表示が消える	指を正しく挿入し再測定してください
指や身体が動いている	歩いたり指先を動かしたりせず安静にして再測定してください
電池が消耗している	新しい電池と交換してください

### ●エラー表示

原因	対処方法
--- PRbpm	脈拍数を検知できなかった
--- %SpO <sub>2</sub>	指ホルダから指を取り除いた

## 保守点検

本製品をご使用になる前に正常かつ安全に作動することを確認してください。


点検項目	点検内容
外観	傷や汚れはありませんか
	電池フタはしっかりと閉まりますか
製品内部	発光部や指センサーに傷や汚れはありませんか
	本体内部が濡れていませんか
操作	電源は入りますか
	画面は表示されますか
	測定中 製品内部のセンサーは点灯していますか
機能	測定値は正しく表示されていますか
その他	ご使用後 指ホルダ内部を清掃しましたか

## お手入れと保管


- 画面に電池マークが表示されたら、電池を交換してください。
- ご使用前に指ホルダ内部をアルコールで拭き、自然乾燥させるか、柔らかい布で拭いてください。
- 清掃するときは、本製品を無理に開かないでください。
- 乾燥している環境、直射日光の当たらない場所、水のかからない場所で保管してください。

## 電池交換


- 裏側の電池フタを矢印の方向へスライドさせて取りはずします。

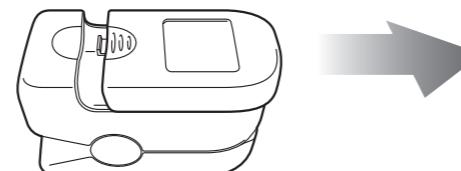

- 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性(+・-)を間違えないように入れてください。  
※電池を廃棄するときは、お住いの自治体の指示に従って廃棄してください。

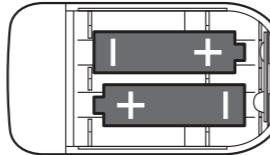

- 電池フタのツメを本体側の凹部に水平に置いてから矢印の方向へ必ずスライドさせて閉めてください。  
上から押して閉めると電池フタを破損させる恐れがあります。

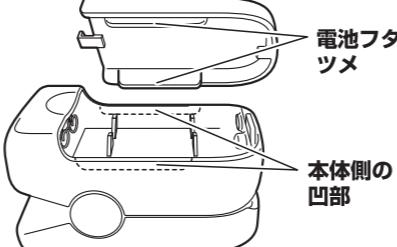

## △ 電池についての警告

- 電池は単4形マンガン乾電池、または単4形アルカリ乾電池をご使用ください。
- ショートさせたり分解、加熱はないでください。また火中に投じないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入った時には、きれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。

## △ 電池についての注意

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ※ 電池の極性(+・-)を正しく入れてください。
  - ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
  - ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。

本製品や、使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。故障した本製品が正しく廃棄されなかった場合、他者に使用され、間違った測定結果を表示する場合があります。