# 電子体温計

# 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用の前に、この取扱 説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全 にご使用ください。お読みになった後は、いつでも 見られるよう大切に保管してください。

## 製造販売元 株式会社 ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9 URL: https://www.dretec.co.ip

## 〈保証規定〉

- ●次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。 ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天 災、地変等による故障または損傷。
  - ※ご使用上に生じる外観の変化。
- ※本保証書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載が ない場合、字句を書き換えられた場合。
- ※本保証書のご提示がない場合。
- ●有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客 様にてご負担願います。
- ●電池は保証対象外です。
- ●お買い上げ後1年間の保証期間内に、正常なご使用状態で 故障した場合には本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上 げ店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無 料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書 を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様 の法律上の権利を制限するものではありません。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- ●保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保 管してください。
- ●ご使用上の注意を守らないことにより損害が生じた場合、 当社は一切責任を負いません。

#### お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内の サービス活動およびその後の安全点検活動のために記載 内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承くださ い。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいた だくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

#### 〈保証書〉

本保証書の記載内容によりこの製品を保証いたします。 本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの 販売店へご相談ください。

AXABIA TOTAL TOTAL							
듄	1	番		TO-103			
保証期間			お買い上げ日より	1 年間	※本体	持込修理	
お買い上げ日			年	月		日	
お	客	様	お名前 ご住所 お電話				
販	売	店*	販売店名 ご住所 お電話				

販売店様へ:\*欄は必ず記入してお渡しください。

# 安全上のご注意

で使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、 正しくお使いください。

以下の警告マークを表示している事項はいずれも安全に 関する重要な内容です。必ずお守りください。

#### 記号の例

- この記号は強制(必ず守ること)
- ○この記号は禁止(してはいけないこと)

この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が死 亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。

- ↑ 検温結果の自己診断や治療は危険です。 医師の指導に従ってください。 自己診断は、症状が悪化するおそれがあります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。 また、お子様だけでの使用はさけてください。 お子様だけで無理にはかろうとしてけがをするおそれがあります。
- ▲製品はわき・口中専用の体温計です。 それ以外(耳など)で検温しないでください。 また、人以外の検温には使用しないでください。 正しい検温ができません。耳などを傷つけるおそれがあります。
- 染み込ませた布などで測温部を拭き、清潔にご使用ください。
- 本体が水などでぬれた状態で検温しないでください。 正しい検温ができません。



この表示の項目について、誤った取扱いをすると、人が傷 害を負う可能性や物的損害の発生が想定されることを示 しています。

※物的損害とは、家屋·家財および家畜·ペットに関わる拡大損害を示します。

いでください。

また、先端で目を突つかないように注意してください。 事故や故障の原因となります。

- ○強い静電気や電磁波のある場所で使用しないでください。 検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。
- 検温値に誤差が生じたり、故障の原因になります。

# ⚠ 雷池について

- ●ショートさせない。分解·加熱をしない。火中に投じない。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、 目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師 の治療を受ける。
- ●万一飲み込むと電気分解反応により消化器が損傷するため、 非常に危険です。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届く ところに置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療 を受ける。
- ●電池の極性(+·-)を正しく入れる。
- ●電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を 取り出す。
- ●電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- ●使用·保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに 気づいたときは使用を中止する。

## 各部の名称

※本書に記載されているイラストはイメージです。

# 本体 測温部 表示部 電源ボタン 電池カバー 収納ケース

付属品

- ●電池(アルカリボタン電池LR41 動作確認用:本体セット済)
- ●収納ケーマ
- ●保証書付取扱説明書(本紙)
- ●添付文書(本紙裏面右側)

# 体温計の正しいあて方

体温計を測定部位に正しくあててはからないと、精度の高い 検温値が得られない場合があります。

### わきではかる場合

●わきの中心ではかる わきから汗をきれいに拭き取っ てから測定してください。

●斜め下から差し入れるよう にしてしっかり挟む

わきと体温計が密着するように 腕を軽く抑えてください。



## 口の中ではかる場合

●舌下のつけ根の左右どちら かにあてる

口を閉じる

●舌で体温計を密着させて

●体温計がはずれないように手 で支え、検温中は口を開かない 口で呼吸をしない

○ 乳幼児には危険ですのでこの方法は絶対にお止めください。

# 正確な検温のために

中央のすじ

あてる位置

- 飲食、運動、入浴後の30分間は検温をお控えください。 ※正確な検温ができません。
- 周囲の温度が10℃を下回るか、40℃を超える場所では 使用しないでください。 ※正確な検温ができません。
- 起床後は動く前にはかるか、動き出してから30分間は 検温をお控えください。 ※起床直後に動き出したときは体温が高くなり、変動が 大きくなっています。
- 正しい方法で検温を行わなかった場合、血行動態や 体躯などによっては、測定精度が保証されない可能性が あります。

# 体温のはかり方(検温)

検温中に数字とともに 本体表示部説明 「℃」表示

雷池消耗時に表示

M

検温値の表示 (「Lo lは31.9℃以下、「HI lは43.0℃以上)

①雷源を入れる 電源ボタンを押す

「ピッ」という音とともに 表示部が全点灯します。

前回値表示中に表示

次に前回の検温結果が表示されます。 表示部に「M」が表示され、前回値 メモリーであることを表示します。 (約2秒間)



## ②「Lo」が表示、「°C」が点滅されたら検温する

「Lo Iが表示され、「℃ Iが点滅すれば測定 可能です。測定部位に測温部をあてて検 温してください。




╗╚┖

## ③「ピー」と終了予告ブザーが10回鳴り、「℃」が 点滅から点灯に変わります。

※終了予告ブザーとは

測定温度の上昇が0.1℃/32秒以下になるとブザーが鳴って お知らせします。このブザーは検温の終了をお知らせするもの ではありません。ブザーが鳴っても、温度は緩やかなカーブで 上昇していきます。

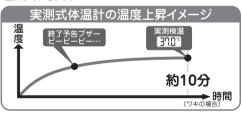

より正確に測るためにはさらに検温を継続されることを お勧めいたします。

※より正確に測るための時間の目安…わき:約10分 口中:約5分

## 4検温結果を確認する

※ブザー音が「ピピピ、ピピピ、ピピピ」と 鳴った場合は、検温結果が37.5℃以上 だったことをお知らせします。

※検温結果は次回起動時までメモリーとして残ります。

### ⑤電源を切って、収納ケースに入れる



※本製品は電源を入れた状態で放置した場合でも、電源を入れて から約12分後に自動的に電源が切れるよう設計されて いますが、電池の消耗を防ぐため検温終了後は電源ボタンを 押して電源を切ってください。

23-10

#### 雷洲交換 ※使用電池:アルカリボタン電池LR41×1個

- ※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命が短かったり、 雷池残量が不足している場合があります。
- ①精密マイナスドライバーを 使用して雷池カバーのロック 部を解除します。電池カバー のロックがはずれたら、 電池カバーをはずします。 マイナスドライバーで指を刺さないよう

注意してください。

- ②本体表面側から指で本体 中身を2.5mm程度本体 から離す方向に引き出します。
- ③本体裏面側から精密マイナス ドライバーで雷池を押し出す ように取り出します。 マイナスドライバーで指を刺さないよう
- ④本体表面を上にした状態で 本体中身を指で押さえ、 電池のプラス面が表になる よう押し込みます。

注意してください。

⑤本体中身を元にもどし、 電池カバーをロック部まで カチッと音がするまで 押し込みます。





ボタン雷池





# お手入れ方法・保管について

#### <お手入れ>

- ●ご使用後は、柔らかい布や脱脂綿等に消毒用アルコールま たはぬるま湯をしみ込ませてかたく絞ったもので、測温部 を軽く拭いてください。
- ■水洗いを行う場合は、洗面器等に貯めた水に体温計を 浸してから、汚れを拭き取るようにし、30分以上の浸漬を 行わないでください。

本製品はIPX7に準じた防浸規格に適合しておりますが、 本規格では流水等の高い水圧や、長時間の浸漬については 保証されておりません。

- ●下記の事を守ってください。故障の原因になります。
- ・体温計の測温部を長時間アルコールに浸したり、熱湯 (50℃を超える湯)で消毒しないでください。
- 超音波洗浄等をしないでください。
- 水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。

#### <保管について>

- ●直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ●長期保管する場合は、電池を本体からはずしてください。
- ●下記のような場所に保管しないでください。
  - 水のかかる場所
  - 高温多湿の場所や直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所、 暖房器具の側、塩分などを含んだ空気の影響がある場所
  - ・傾斜、振動、衝撃のある場所
  - ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所
  - 小さな子供や乳幼児の手の届く場所

# 故障かな?と思ったら

- ●電源が入らない/表示部に「▼」が表示される
- ・電池の向き(極性 + · )を確認してください。
- ・電池を交換してください。

#### ●思ったより測定値が低い

- わきの汗をきれいに拭き取ってください。
- ・測温部を正しい測定部位に当ててください。
- ・測定時間が短かった可能性があります。終了予告ブザーが 鳴ったあとも検温を続けてください。

#### ●思ったより測定値が高い

- ・測温部を冷やし、電源を入れたあと「Lo 」が表示されることを 確認してから再度測定してください。
- ●測定値が一定していない、ばらつく
- ・測温部を正しく測定部位に当ててください。
- · P3の「体温計の正しいあて方」をご参照ください。

#### ●Errと表示される

- 製品に不具合が生じています。
- 「アフターサービスについて」をご参照ください

# サ

修理やお取扱いのご相談は、まずお買い上げの販売店へ お申し付けください。

- 1 製品の保証について
- ●この説明書には製品の保証書がついています。 保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」 などの記入を受け、ご確認の上内容をよくお読みいただき、 大切に保管してください。

## 保証期間:お買い上げ日から1年間

- ●保証期間中でも有料となる場合がありますので、<保証規定> をよくお読みください。
- ●当社修理技術者以外の人が分解・修理した場合は、保証対象外 となります。

#### 2. 修理を依頼されるとき

- ●「故障かな?と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときは ご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- ●保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。 なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- ●保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談くだ。 さい。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。
- 3. アフターサービスについてご不明な場合
- ▶お買い上げの販売店または、「株式会社ドリテックお客様相談 センター! までお問い合わせください。

## お客様相談センター

#### **(**20-875-019)

受付時間:月~金9:00~12:00.13:00~17:00 祝祭日および当社指定休日を除く LIBL: https://www.dretec.co.in



# 仕様

品番	TO-103		
販売名	電子体温計TO-103		
認証番号	第305AKBZX00056000号		
測定範囲	32.0~42.9℃ 31.9℃以下で「Lo」表示 43.0℃以上で「H」表示		
測定精度	±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時		
温度表示	3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎		
電擊保護	内部電源機器BF形		
測温部	サーミスタ		
使用環境温湿度	10~40℃ 30~85%RH (結露なきこと)		
保管環境温湿度	-10~60℃ 30~90%RH (結露なきこと)		
寸法と質量	W123×D18×H10mm 約11g(電池を含む)		
電源電圧	DC1.5V(アルカリボタン電池LR41×1個)		
電池寿命	約2年(新品電池を一日12分使用の場合)		
種類	電子体温計 一般用		
測定方式	実測		

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがあり ますのでご了承ください。