

アプリケーションをインストールする

○インストール方法は2通りあります。

①下記QRコードまたはURLより、お使いのスマートフォンに「dretec life」アプリをインストールします。



https://www.dretec.co.jp/support/dretec_life_apps

②アプリストアにて「dretec life」と検索して、アプリをインストールします。




アプリケーションを起動する



「dretec life」アプリのインストールが完了したら
左図のアイコンをタップし、アプリを起動します。

※本アプリはインターネット通信、Bluetooth®通信を使用します。電波の良い所で使用し、デバイスとの通信を行う際はスマートフォン本体のBluetooth®設定を有効にしてください。

アカウントを作成する

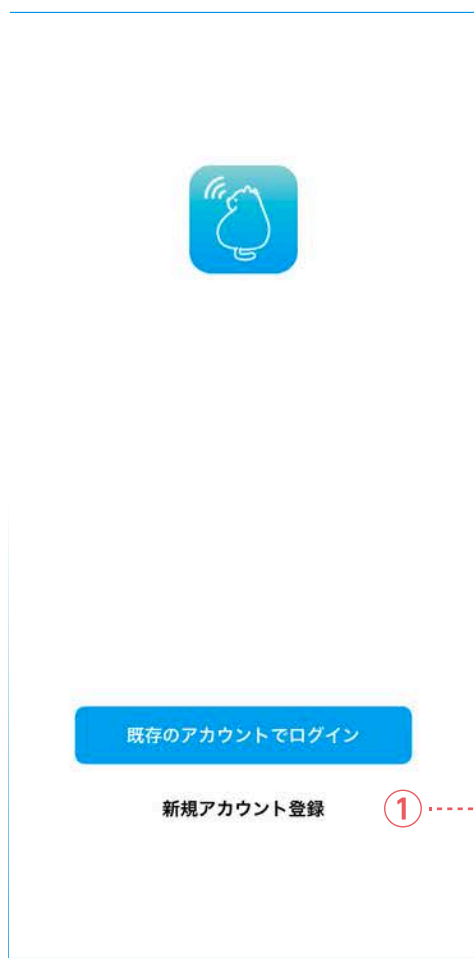

① [新規アカウント登録] をタップする。

② [国 / 地域] は「日本」を選択する。

③ メールアドレスを入力する。
※受信可能なメールアドレスを入力してください。

④ [プライバシーポリシー] 及び [ユーザー規約] を確認後、同意する場合はチェックボックスをタップする。

※チェックを入れないと登録できません。

⑤ [認証コードの取得] をタップする。
※メールアドレスを入力し、チェックボックスをタップすると、[認証コードの取得] ボタンのタップが可能になります。

<

認証コードを入力

1 [] [] [] [] []

Eメールに認証コードが送信されました：
hajiy5633@yahoo.co.jp 再送信 (58s)

[認証コードが届いていませんか？](#)

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0		< X

○入力したメールアドレス宛に 6 桁の認証コードが記載されたメールが届きます。

⑥届いた認証コードを確認し、入力する。

※メールが届かない場合

- ・メールアドレスが間違っている
- ・迷惑メールフォルダに入ってしまった
- ・ご使用のメールアプリのブロック機能がメールをブロックしている

等の可能性が考えられます。

上記の問題を確認し、再送信を行ってください。

入力した認証コードが正しい場合、次の画面が表示されます。

<

パスワードを設定

パスワード

アルファベットと数字を含む 6～20 桁

完了

○パスワードを設定します。

⑦任意のパスワードを入力する。

※パスワードは、アルファベットと数字を含む 6～20 桁の間で作成してください。

⑧[完了] をタップする。

ホーム画面 各アイコンの説明




○アカウントを作成し、ログインが完了すると、マイホーム画面が表示されます。

〈マイホーム画面〉

①dretec life アプリに dretec life 対応デバイスを接続し、登録を行います。
画面中央の [デバイスの追加]、画面右上の [⊕]、どちらかをタップして登録してください。

②アカウント情報画面を表示します。
プロフィール画像や、ニックネームを設定できます。

③[プロフィール画面] を表示します。

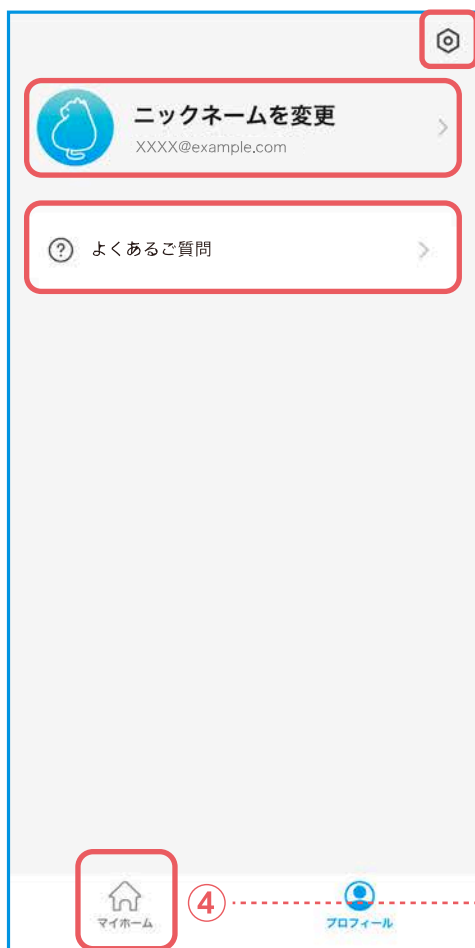

〈プロフィール画面〉

①各設定画面を表示します。
アプリの設定を確認、変更することができます。

②アカウント情報画面を表示します。
マイホーム画面の②ボタンと同様です。
プロフィール画像や、ニックネームを設定できます。

③弊社 HP の「よくあるご質問」ページを表示します。
アプリの操作方法について分からない事がありましたら、こちらから Q&A を確認できます。

④[マイホーム画面] を表示します。

デバイスの登録方法

○ご購入いただいた dretec life 対応デバイスを使用してアプリに測定結果を記録するため、アプリにデバイスを登録します。


※デバイスを登録するためには、登録が完了するまでデバイスの電源をONにし続ける必要があります。
デバイスによっては「自動電源 OFF 機能」により、自動的に電源が OFF になるものがございます。
登録中にデバイスの電源が OFF にならないよう、測定を行ったままアプリへの登録を行ってください。

○ここでは例として、体組成計「Dr.SCANconnect」(品番：BS-404) を登録する場合をご紹介します。
※dretec life 対応デバイスは、順次追加予定です。




○マイホーム画面を表示させます。


①マイホーム画面の [デバイスの追加]、または
[+] ボタンをタップします。
測定台に乗り、デバイスの電源を入れます。

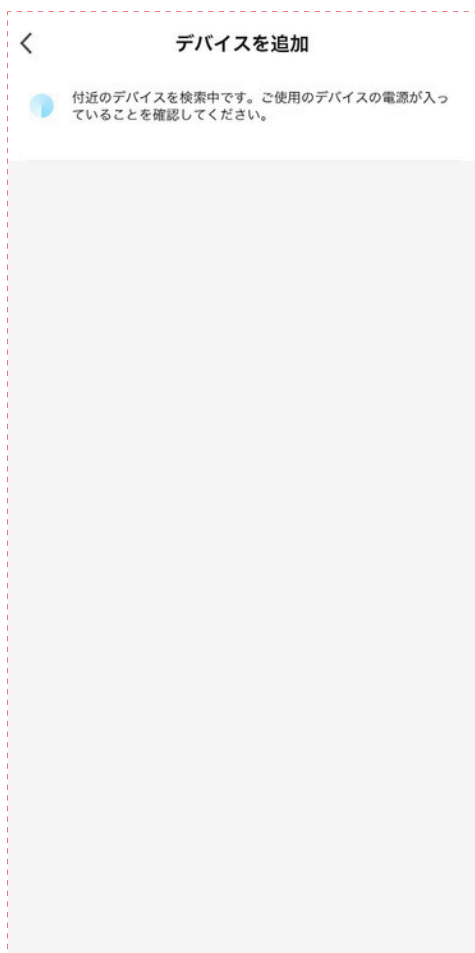


スマートフォン本体の付近にある、dretec life 対応デバイスを検索しています。
※検索結果によって、異なる画面が表示されます。

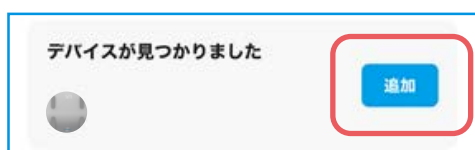


○付近に登録可能なデバイスが見つかった場合
①[追加] をタップする。

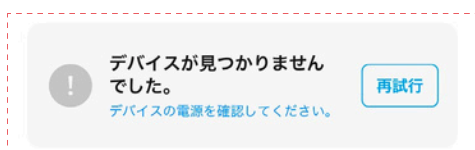

○デバイスが見つからなかった場合
①デバイスの電源が入っていることを確認してください。また、スマートフォン本体とデバイスの間に障害物がある場合や、付近で電子レンジ等電波を発する機器を使用している場合、接続が不安定になることがあります。デバイスの電源が入っていること、スマートフォン本体とデバイスとの間に障害物がないことを確認し、再度デバイスの追加をお試しください。

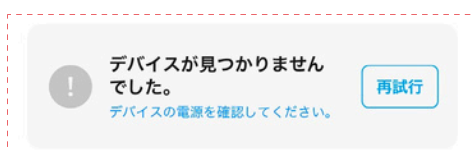


②スマートフォン本体のBluetooth® 設定がOFFになっている、または、Bluetooth® の使用がdretec life アプリに許可されていません。スマートフォン本体の設定アプリを起動して、dretec life へのアクセス許可の設定を確認してください。

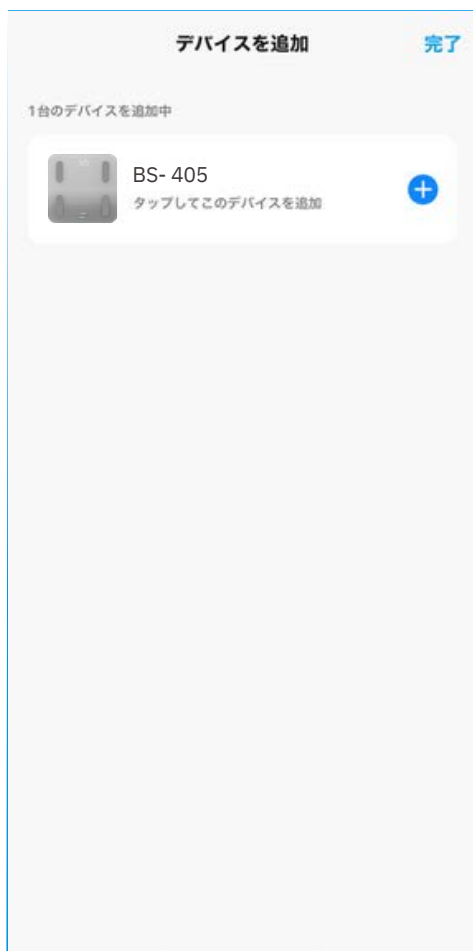

①[+] ボタンをタップし、デバイスを追加する。

[+] ボタンをタップせずに画面右上の [完了] をタップしてしまうと、デバイスの追加を行わずホーム画面に戻ってしまいますので、ご注意ください。

[+] ボタンをタップすると、デバイスの登録が始まります。登録が完了するまで、デバイスの電源は切らないようにしてください。

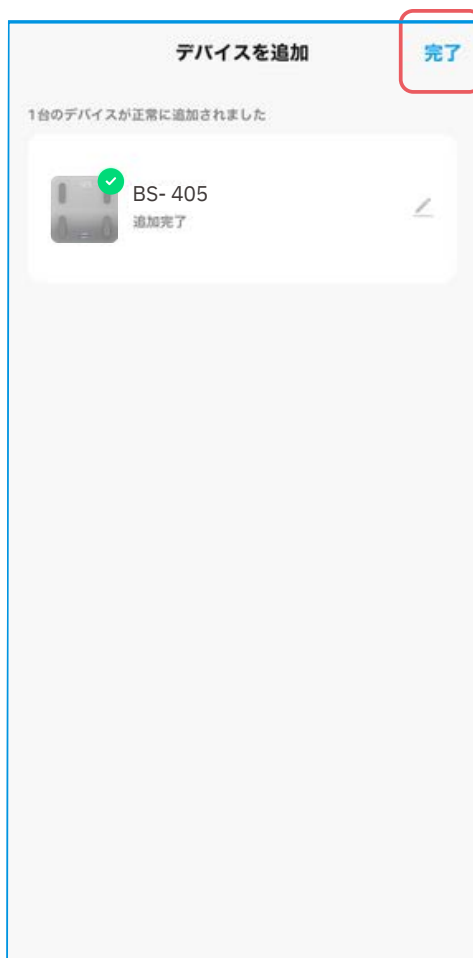

○アイコン画面にチェックマーク  が表示されたら、デバイスの登録は完了です。

②[完了] をタップすると、ユーザー情報の入力画面が表示されます。

ニックネームや性別、身長、生年月日などを正しく入力してください。ユーザー情報の入力完了すると登録したデバイスの測定画面が表示され、測定結果の記録を行うことができます。

※登録中にデバイスの電源がOFFになる、通信状況が不安定などの理由でデバイスの登録が完了しない場合があります。その場合、通信環境の確認やアプリの再起動を行い、デバイスの再起動を行ってください。



デバイスの登録が完了すると、マイホーム画面に登録したデバイスが表示されます。

次回以降は、使用するデバイスをタップして測定画面を表示し、デバイスの電源を ON にすることでデバイスとアプリが自動的に接続されます。

その他、詳細な設定方法については、弊社 HP の「よくあるご質問」から、「dretec life」の Q&A でご確認ください。

○よくあるご質問 (Q&A) dretec life

https://dretec.co.jp/product-faq/dretec_life

○株式会社ドリテックホームページ

<https://dretec.co.jp>

